

Πολλαπλό Αναπνευστικό Πολυπαθογενετικό Τεστ Αντιγόνου (Ανοσοχρωματογραφική Ανάλυση)



BioTeke
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



1. Διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης
2. Ετοιμάστε ένα ρολόι (ή χρονόμετρο), χαρτομάντηλα και αντισηπτικό χεριών ή σαπούνι με ζεστό νερό.
3. Ελέγξτε τα περιεχόμενα του κιτ. Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν είναι κατεστραμμένο ή σπασμένο.

-Για πρόσθια ρινικά επιχρίσματα

-Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε τη δοκιμή.

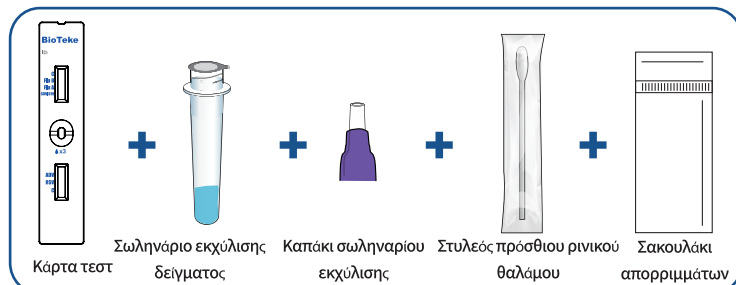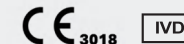


Σημείωση: Οι κάρτες τεστ που έχουν διατηρηθεί σε χαμηλή θερμοκρασία πρέπει να επανέλθουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν ανοιχτούν για να αποφευχθεί η απορρόφηση υγρασίας.

Σημείωση: Υλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται:

- (1) Ρολόι (ή χρονόμετρο),
- (2) Χαρτομάντηλα,
- (3) Αντισηπτικό χεριών / σαπούνι.



Πλύνετε καλά τα χέρια σας για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα πριν το τεστ.

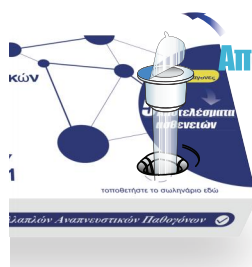

Αποφλοίωση





Τοποθετήστε το σωληνάριο στη βάση του κιτ και αφαιρέστε απαλά τη σφραγισμένη αλουμινένια μεμβράνη.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η συσκευασία του στυλεού είναι ανοιχτή, δεν είναι αποστειρωμένος και ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιηθεί!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλώ φυσήξτε τη μύτη σας πριν τη λήψη δείγματος.

Αφαιρέστε το στυλεό από το περιτύλιγμα κρατώντας τη λαβή, προσέχοντας να μην αγγίξετε την άκρη με το βαμβάκι.

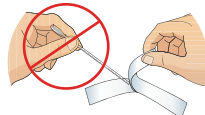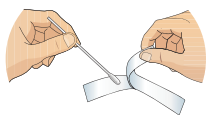


Εισάγετε απαλά το στυλεό στο ρουθούνι σας σε βάθος μικρότερο από 2,5 εκ. (1 ίντσα). Στρίψτε αργά και κυκλικά το στυλεό στα εσωτερικά τοιχώματα του ρουθουνιού κάνοντας τουλάχιστον 5 μεγάλους κύκλους. Μην περιστρέψετε απλά το στυλεό. Επαναλάβετε στο άλλο ρουθούνι με τον ίδιο στυλεό.

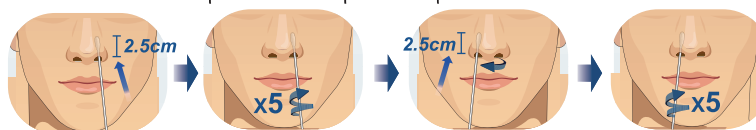


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα παιδιά, το μέγιστο βάθος εισαγωγής μπορεί να είναι μικρότερο από 2 εκ. (3/4 ίντσας).




Εισάγετε το στυλεό στο σωληνάριο δείγματος. Ακουμπήστε τον πάτο με το βαμβάκι και ανακατέψτε τουλάχιστον 5 φορές. Σφίξτε το εξωτερικό μέρος του σωληναρίου γύρω από το στυλεό 5 φορές.

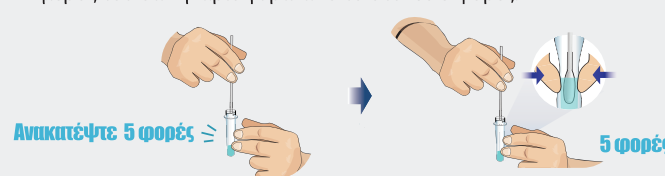

Αφαιρέστε το στυλεό περιστρέφοντας τον μέσα στο σωληνάριο και ταυτόχρονα πιέστε τις εξωτερικές πλευρές του σωληναρίου για να απελευθερωθεί το υγρό. Πετάξτε το στυλεό στο σακουλάκι απορριμμάτων.

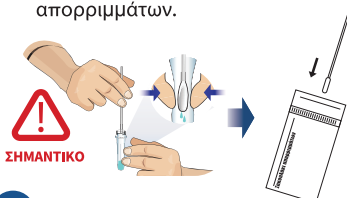

Ανοίξτε το φακελάκι και βγάλτε την κάρτα τεστ. Τοποθετήστε την σε επίπεδη, καθαρή και στεγνή επιφάνεια. Γυρίστε ανάποδα το σωληνάριο με το σταγονομετρικό καπάκι και ρίξτε αργά 3 σταγόνες στο ειδικό πλαίσιο της κάρτας.

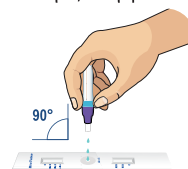

Διαβάστε το αποτέλεσμα μεταξύ 15-20 λεπτών.



Ερμηνεία αποτελεσμάτων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην διαβάσετε τα αποτελέσματα του τεστ μετά από 30 λεπτά.

Ιθετικό: SARS-CoV-2 (COVID-19) θετικό: Εμφανίζονται δύο χρωματιστές γραμμές στο παράθυρο δοκιμής COVID-19/Flu A/Flu B. Μια σκούρα μπλε/μωβ γραμμή εμφανίζεται στη θέση (C) και μία κόκκινη γραμμή στη θέση (COVID-19).

Γρίπη Α (Flu A) θετικό: Εμφανίζονται δύο χρωματιστές γραμμές στο παράθυρο δοκιμής COVID-19/Flu A/Flu B. Μια σκούρα μπλε/μωβ γραμμή εμφανίζεται στη θέση (C) και μία μπλε γραμμή στη θέση (Flu A).

Γρίπη Β (Flu B) θετικό: Εμφανίζονται δύο χρωματιστές γραμμές στο παράθυρο δοκιμής COVID-19/Flu A/Flu B. Μια σκούρα μπλε/μωβ γραμμή εμφανίζεται στη θέση (C) και μία μπλε γραμμή στη θέση (Flu B).

Αναπνευστικός Συγκυτιακός Ιός (RSV) θετικό: Εμφανίζονται δύο χρωματιστές γραμμές στο παράθυρο δοκιμής RSV/ADV. Μια σκούρα μπλε/μωβ γραμμή εμφανίζεται στη θέση (C) και μία μπλε γραμμή στη θέση (RSV).

Αδενικός (ADV) θετικό: Εμφανίζονται δύο χρωματιστές γραμμές στο παράθυρο δοκιμής RSV/ADV. Μια σκούρα μπλε/μωβ γραμμή εμφανίζεται στη θέση (C) και μία κόκκινη γραμμή στη θέση (ADV).

Πολυπλή μολύνση: Πολυπλή μολύνση: Εμφανίζονται δύο χρωματιστές γραμμές στη θέση (C) σε δύο ξεχωριστά παράθυρα. Εάν εμφανιστεί η άλλη γραμμή, το αντίστοιχο παθογόνο θα είναι θετικό.

Σημείωση: Ένα θετικό αποτέλεσμα σημαίνει ότι είναι πιθανό να έχετε μολυνθεί με τον ιό SARS-CoV-2/ιό γρίπης Α/ιό γρίπης Β/Αναπνευστικό Συγκυτιακό Ιό/Αδενόϊο.

Σημείωση: Τα αποτελέσματα του τεστ πρέπει πάντα να ερμηνεύονται σε συνδυασμό με τις κλινικές παρατηρήσεις και τα επιδημιολογικά δεδομένα κατά τη λήψη της τελικής διάγνωσης και των αποφάσεων για τη διαχείριση του ασθενούς.



Ιατρικό:

Στο παράθυρο ανίχνευσης COVID-19/Flu A/Flu B/RSV/ADV εμφανίζονται δύο σκούρες μπλε/μωβ γραμμές στη θέση (C) και δεν εμφανίζεται καμία γραμμή στην περιοχή ανίχνευσης (COVID-19/Flu A/Flu B/RSV/ADV). Αυτό υποδηλώνει ότι ο ιός SARS-CoV-2, ο ιός γρίπης Α, ο ιός γρίπης Β, ο Αναπνευστικός Συγκυτιακός Ιός ή ο Αδενόϊος δεν ανιχνεύθηκαν στο δείγμα.

Στο παράθυρο ανίχνευσης COVID-19/Flu A/Flu B/RSV/ADV εμφανίζονται δύο σκούρες μπλε/μωβ γραμμές στη θέση (C) και δεν εμφανίζεται καμία γραμμή στην περιοχή ανίχνευσης (COVID-19/Flu A/Flu B/RSV/ADV). Αυτό υποδηλώνει ότι ο ιός SARS-CoV-2, ο ιός γρίπης Α, ο ιός γρίπης Β, ο Αναπνευστικός Συγκυτιακός Ιός ή ο Αδενόϊος δεν ανιχνεύθηκαν στο δείγμα. Ωστόσο, ένα αρνητικό αποτέλεσμα δεν αποκλείει την απουσία λοίμωξης από SARS-CoV-2, ιό γρίπης Α, ιό γρίπης Β, Αναπνευστικό Συγκυτιακό Ιό ή Αδενόϊο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως η μοναδική βάση για θεραπεία ή για λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση του ασθενούς. Τα αρνητικά αποτελέσματα πρέπει να αξιολογούνται στο πλαίσιο του πρόσφατου ιστορικού έκθεσης του ατόμου, του ιατρικού ιστορικού και της παρουσίας κλινικών σημείων και συμπτωμάτων που είναι συμβατά με λοίμωξη από SARS-CoV-2, ιό γρίπης Α, ιό γρίπης Β, Αναπνευστικό Συγκυτιακό Ιό ή Αδενόϊο, και να επιβεβαιώνονται με μοριακή εξέταση (PCR), εφόσον είναι αναγκαίο για τη διαχείριση του ασθενούς.

Ιακροί:

Αν η γραμμές ελέγχου (C) δεν εμφανιστούν, το τεστ είναι άκυρο. Αν το αποτέλεσμα είναι άκυρο, σημαίνει ότι κάτι πήγε λάθος κατά την διαδικασία του τεστ και τα αποτελέσματα δεν μπορούν να διαβαστούν σωστά. Θα πρέπει να επαναλάβετε το τεστ.



Όλα τα χρησιμοποιημένα εξαρτήματα απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Μετά το τεστ, πλύνετε τα χέρια σας ή χρησιμοποιήστε αντισηπτικό.

